


家庭用

管理医療機器 家庭用電気マッサージ器

# Massage Chair

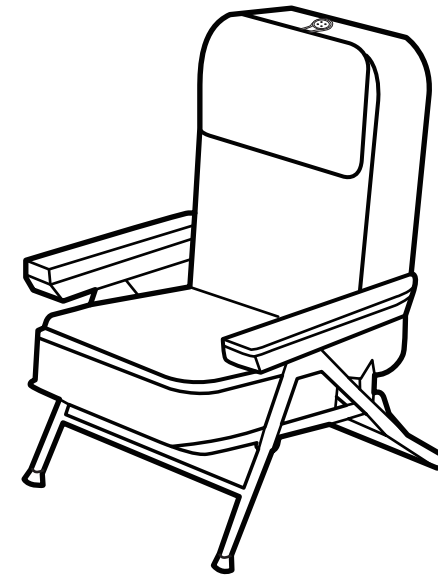

ポルト マッサージチェア  
AIM-250

取扱説明書 保証書付  
添付文書

このたびは、ポルト マッサージチェアをお買い上げいただき、ありがとうございました。この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。とくに「安全にお使いいただくために」は必ずお読みください。お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。



「ホームページ」のご案内

ホームページでは新製品情報や、商品に関するさまざまな情報をお届けしております。また、お客様の商品購入やお問い合わせにもご対応いただける便利なホームページです。ぜひ、一度ご覧ください。

<http://www.tsukamoto-aim.co.jp/>

## 保証書

持込修理

ポルト マッサージチェア AIM-250

お買い上げ日			保証期間
年	月	日	お買い上げ日より1年間(本体)

お客様

フリガナ  
お名前

様

ご住所 〒

☎

販売店

修理メモ

この保証書は、本書記載内容で無料修理させていただくことをお約束するものです。本書は再発行しませんので、大切に保管してください。通信販売等で購入された場合は、商品の送り状に記載された着荷日をお買い上げ日とさせていただきます。販売店欄に記入のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出いただき、記入を受けてください。

- 取扱説明書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。
- 本書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 



(1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による損傷。	(4) 一般家庭用以外(業務用)に使用された場合の故障または損傷。
(2) お買い上げ後の輸送、落下等による損傷。	(5) 指定外電源(電圧、周波数)使用による損傷。
(3) 火災、浸水、不慮の事故、その他天災による損傷。	(6) 側生地、付属品の交換および修理費用。
- お客様の個人情報のお取扱いについて  
お客様よりお知らせいただいた氏名・住所などの個人情報は、当社商品のご相談への対応や修理及びその確認などに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。




もくじ


安全にお使いいただくために … 1～5  
 使用目的 / 効能または効果 …… 5  
 各部の名前とはたらき …… 6～7  
 ご使用の前に …… 8  
 使いかた …… 11  
 お手入れについて …… 11  
 主な仕様 …… 13  
 故障かな?と思ったら …… 14  
 保証とアフターサービス …… 15  
 保証書 …… 裏表紙

# 安全にお使いいただくために

本製品は安全を十分に考慮して設計されていますが、電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながる場合があります。お使いになる前に、この「安全にお使いいただくために」をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

警告／注意表示について	
 <b>警告</b>	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重症を負うことが想定される危害の程度。
 <b>注意</b>	取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害※の発生が想定される危害・損害の程度。 *物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

安全記号について	
この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、次の3種類の記号を併記して注意を促しています。	
	警告・注意を喚起する。
	禁止行為を示す。
	指示に基づく行為を強制する。

警告	
<b>万一、異常や故障が発生したときはすぐに使用をやめてください</b> そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。またお客様による分解・修理は絶対にお止めください。	
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> <li>●煙が出ている、変なおいや音がする(異常状態)</li> <li>●本製品の内部に水や異物などが入った</li> <li>●電源コードが損傷または断線した</li> <li>●落としたり、本製品を破損した</li> </ul> <p style="text-align: center;">↓</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>①使用中の場合はすぐに操作部の「急停止」ボタンを押して使用をやめる</li> <li>②電源プラグをコンセントから抜く</li> <li>③『お買い上げの販売店』、または『お客様相談窓口』へ修理を依頼する</li> </ol>

## 使用者の体調に関する注意

### 警告



医師の治療を受けている人や、次のような症状のある人は、使用する前に医師と相談する

- ・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している人
  - ・悪性腫瘍(しゅよう)のある人
  - ・心臓に障害のある人
  - ・妊娠中や出産直後の人
  - ・糖尿病などによる高度な末梢(しょう)循環障害からくる知覚障害のある人
  - ・治療部位に創傷のある人
  - ・かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する人
  - ・貧血症の人
  - ・安静を必要とする人
  - ・体温 38℃以上(有熱期)の人  
例：急性炎症症状(けん怠感、悪寒、血圧変動など)の強いときや、衰弱しているとき
  - ・骨粗しょう症の人、脊椎(せきつい)の骨折、捻挫(ねんざ)、肉離れなどの急性疼(とう)痛性疾患の人
  - ・温度感覚喪失が認められる人
  - ・背骨に異常のある人、または背骨が左右に曲がっている人
  - ・乗り物酔いなどのめまい症状のある人
  - ・上記以外に、とくに身体に異常を感じている人
  - ・医療機関で治療中の人
  - ・腱鞘炎の人
- 事故や体調不良をおこすおそれがあります。



次の人は使用しない

医師からマッサージを禁じられている人  
例：血栓(そく)栓症、重度の動脈瘤(りゅう)、急性静脈瘤(りゅう)、各種皮膚炎、各種皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など症状を悪化させるおそれがあります。



熱や痛み敏感でない人はヒーター機能を使用しない

低温やけどのおそれがあります。



自分で意思表示ができない人や、自分で操作できない人には使用させない

事故やけどのおそれがあります。



肌の弱い人は素肌で使用しない

摩擦により皮膚を傷めるおそれがあります。

### 注意



使用中、身体に異常を感じたときは、ただちに使用をやめて医師に相談する

そのまま使い続けると症状が悪化し、事故や体調不良をおこすおそれがあります。



本製品の使用時間は1回15分以内とする

長時間のご使用は、筋肉や神経に対して必要以上の刺激が与えられ、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。使用しても効果が感じられない場合は、医師または専門家にご相談ください。



マッサージ以外の目的には使用しない

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



他の健康用機器や治療器と併用して使用しない

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



食後および飲酒後は使用しない

体調不良をおこすおそれがあります。



使用中は眠らない

事故やけがのおそれがあります。

## 使用に関する注意



**警告**



必ず守る

必ず交流100Vで使用する。また、付属のACアダプター以外は使用しない  
専用ACアダプター (IVP1200-2500P)

火災や感電の原因になります。



必ず守る

ご使用前には、必ず本体カバーが破れていないか確認する(どんな小さな破れでも、ただちに使用を中止し、電源プラグを抜き、修理を依頼してください)

布地が破れた状態で使用すると、感電やけがのおそれがあります。



禁止

専用ACアダプターコードに負荷をかけたり、傷つけたりしない

専用ACアダプターコードやプラグの誤った取り扱い、専用ACアダプターコードに負荷をかけたり、傷つけたりすることによる感電や火災の原因となります。次のことをお守りください。

- ・専用ACアダプターコードを加工したり傷つけたりしない。
- ・専用ACアダプターコードを熱器具に近づけない。
- ・専用ACアダプターコードの上に重いものを載せたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
- ・専用ACアダプターコードが傷ついたり、電源コンセントへの差し込みがゆるんでいるときは使用しない。
- ・電源コンセントから電源プラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ず電源プラグを持って抜く。
- ・専用ACアダプターコードを本製品に巻きつけない。
- ・電源コンセントや配線器具など、たこ足配線等で定格を超える使いかたはしない。



必ず守る

電源プラグは根元まで確実に差し込む

感電や発熱による火災の原因になります。



必ず守る

電源プラグのホコリ等は定期的にとる

プラグにホコリ等がたまると湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。定期的に電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



禁止

首周辺をマッサージするときのみみ玉の動きに注意する  
また首前方はマッサージしない

事故やけがのおそれがあります。



禁止

本体可動部やすき間などに頭、手や足などを入れない

事故やけがのおそれがあります。



禁止

使用中に専用ACアダプターコードを抜かない

事故やけがのおそれがあります。



禁止

本体と床面との間にDCコード、リモコンコードを挟まない

事故やけがのおそれがあります。



禁止

子供に使用させない  
また、使用中は子供を近づけない

事故やけがのおそれがあります。



禁止

頭・胸・腹部のマッサージに使用しない

事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。



禁止

本体の上に立ったり、飛び跳ねたり不安定な姿勢で使用しない

事故やけがのおそれがあります。とくに小さなお子さまが遊んだりしないようご注意ください。



分解禁止

絶対に分解や改造、修理をしない  
また、本体のファスナーを開けない

感電の原因になります。また発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります。



ぬれ手禁止

身体がぬれた状態で本製品を使用しない

感電の原因になります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない

感電の原因になります。



禁止

本体の上に座った状態で使用しない

本体に負荷がかかりすぎ、事故やけがのおそれがあります。



禁止

身体を本体に強く押し付けて使用しない

皮膚や筋肉を傷める原因になります。



禁止

身体にアクセサリや、マフラーなどをつけて使用しない

機構部に接触して事故やけがのおそれがあります。



禁止

直射日光の当たるところでは使用しない

変形・変色・変質のおそれがあります。



**注意**



必ず守る

ご使用前には、必ずボタン、タイマーなどが正常に作動するか確認する

事故やけがのおそれがあります。



電源プラグを抜く

動かなくなったり、異常を感じた場合は、ただちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く

漏電やショートなどによる感電や火災の原因になります。勝手に修理などせずお買い上げ販売店に点検・修理を依頼してください。



禁止

本体カバーをはずして使用しない

事故やけがのおそれがあります。



禁止

生地を無理に引っ張ったり、刃物やとがたもので突き刺したりしない

けがや故障の原因になります。



禁止

本体やリモコン、ACアダプターを落としたり、強い衝撃を与えない

火災や感電、故障の原因になります。



電源プラグを抜く

停電のときは、ただちに入/切ボタンで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

電源プラグがコンセントに差し込まれたまままで通電が再開した場合、事故やけがのおそれがあります。



禁止

本体およびもみ玉に無理な力をかけたり、上に立ったり、座ったりまたは踏み台にしたりしない

けがや故障の原因になります。



禁止

操作ボタンを2つ以上同時に押さない

故障の原因になります。



禁止

ピンや金属類、燃えやすいものなどを本体に入れない

火災・感電・故障の原因になります。



禁止

本製品は一般家庭用なので、業務用として使用しない



水ぬれ禁止

本体やリモコン、ACアダプターに水などをこぼさない

火災や感電、故障の原因になります。



必ず守る

周囲に人やペットがいないか、物を置いていないか、必ず確認する

事故やけがのおそれがあります。



必ず守る

アームレストを下げる際、必ずフィンガーポケットに手をかけて行う

手を挟み、事故やけがの原因となります。

部分を持つと指を挟む恐れがあります。



必ず守る

リクライニングの角度を戻す時は背もたれに背をつけた状態で行う  
背もたれの後ろに障害物や人、動物がいないか確認してリクライニングする  
事故やけがのおそれがあります。



禁止

アームレストを持ったり、その周辺に手を入れたりしない

手を挟み、事故やけがの原因となります。

## 使用場所についての注意

### ⚠ 注意

**!** 周囲に障害物のない、床面が水平な場所に設置する  
必ず守る 事故やけがのおそれがあります。

**⊘** ストープなどの火気の近くで使用したり、ホットカーペットなどの暖房器具の上で使用しない  
禁止 火災や事故、故障の原因になります。また、たばこを吸いながらの使用も、火災の原因になります。

**⊘** 本体に布や毛布などをかぶせて使用しない  
禁止 本体内部の温度が上昇し、火災や事故、故障の原因になります。

**⊘** 浴室など本体に水のかかりやすい場所や湿気の多い場所で使用・保管しない  
水場使用禁止 故障や変形・変質のおそれがあります。

## 保守についての注意

### ⚠ 注意

**⚡** お手入れをするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
電源プラグを抜く 電源プラグがコンセントに差し込まれたままだと、火災や感電の原因になります。

**⚡** 長時間使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
電源プラグを抜く 絶縁劣化になり、感電や漏電火災の原因になります。

**!** 長期間使用しなかったときは、使用前に動作の確認をする  
必ず守る 内部部品が劣化している場合、事故やけがのおそれがあります。正常に動作しない場合は、必ずお買い上げ販売店にご相談ください。

**⊘** 本製品を移動するときは、引きずらない  
禁止 床や畳を傷つけるおそれがあります。

**⊘** お手入れにはベンジン、シンナー、アルコール、アルカリ性洗剤、漂白剤などは使用しない  
禁止 変形や変質など本体の外装を傷めるおそれがあります。

## 使用目的 / 効能または効果

あんま、マッサージの代用。一般家庭で使用すること。




- 疲労回復 ● 血行をよくする ● 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす ● 神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

### ⚠ ご注意

効能や効果は個人により差があります


## 各部の名前とはたらき

### 本体

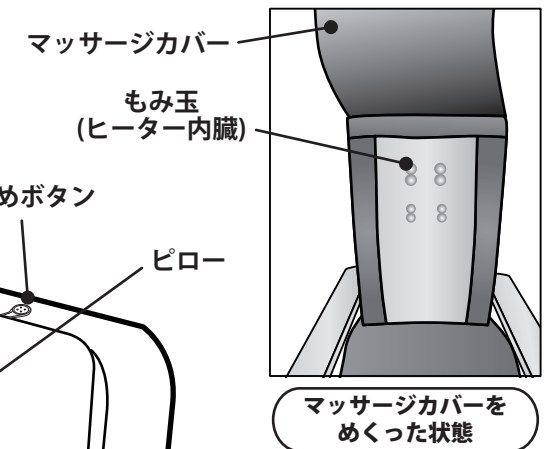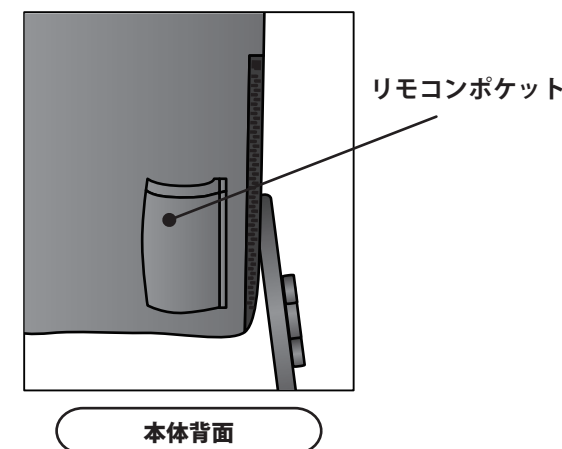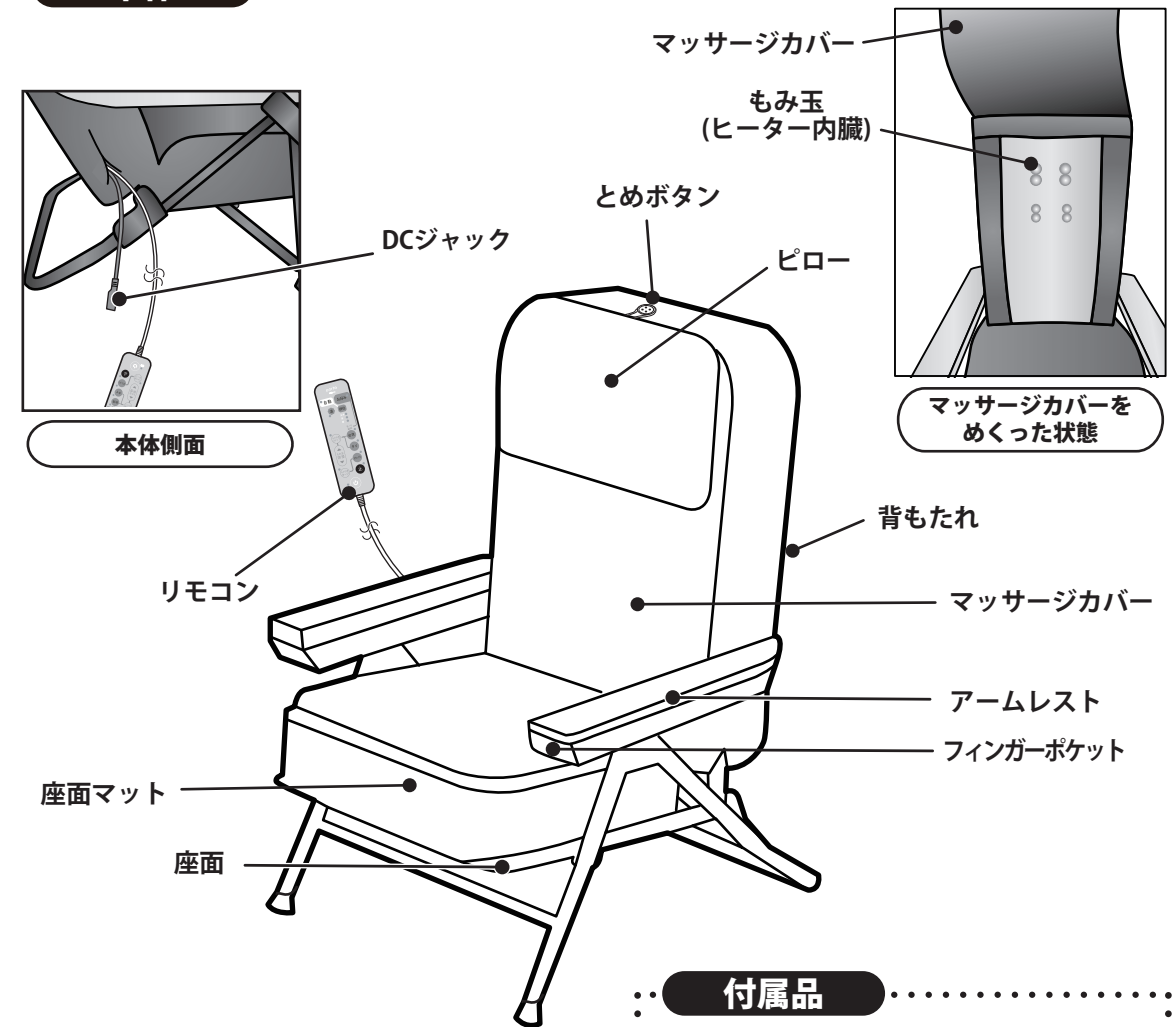

### 付属品

#### ● ACアダプター(型式: IVP1200-2500P)

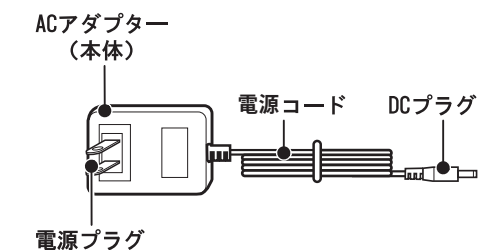

**⚠ 警告** 付属のACアダプター以外は使用しないでください。

# 各部の名前とはたらき

## 自動コースボタン

自動コースを使用するときに押します。

## ヒーターボタン

ボタンを押すとヒーターが入ります。

## もみ位置ストップボタン

日本モード / タイモードを選択中にボタンを押すともみ玉が回転しながらその場で停止します。

## もみ玉調整ボタン

もみ位置ストップボタンを選択中にボタンを押すと上下に移動します。

## もみ幅変更ボタン

スウェーデンモード選択中にボタンを押すと、もみ玉が回転して角度が変わります。

## 電源ランプ

本体のDCジャックとACアダプターのDCプラグを接続し、専用ACアダプターの電源プラグをコンセントに接続すると「電源」ランプが点灯し、待機状態となります。



## お好みモードボタン

お好みモードを使用するときに押します。

## 部位ボタン

自動コース、お好みモードボタンを押した後に、部位を選択するときに押します。

## タイボタン

体の中心から外側へゆっくりと背筋を伸ばすようにストレッチします。  
※タイモード

## 日本ボタン

指や手のひらで加圧するようにストレッチします。  
※日本モード

## スウェーデンボタン

筋肉や骨格に沿って、滑らせるように優しくストレッチします。  
※スウェーデンモード

## 急停止ボタン

ボタンを押すとその場でもみ玉が停止します。

## 電源ボタン

ボタンを押すとマッサージ動作が止まり、もみ玉が最上部へ移動します。


# ご使用の前に

## 1 本体を設置する

周囲に障害物のない、床面が水平な場所を選び設置します。床面を傷つけないために、設置場所にはマット等を敷くことをおすすめします。

### 設置のしかた

- ① ピローを止めボタンにくくりつける。
- ② 座面マットを座面に乗せます。

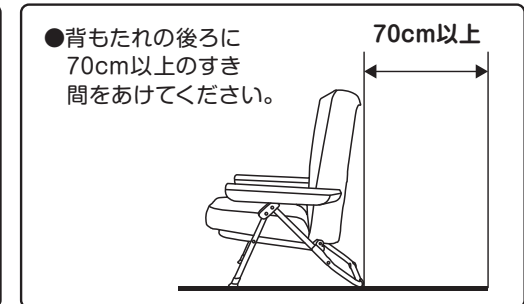

- ホットカーペットなどの暖房器具の上に設置しないでください。
- 移動するときは、折りたたんだ状態で移動してください。

### 本体の持ちかた


本製品を置くときや移動する場合は必ず座面マットが本体から外れた状態で折りたたみ、背もたれの下と座面をしっかり持ってください。

**注意** アームレストを持ったり、その周辺に手を入れたりしない  
手を挟み、事故やけがの原因となります。



### 本体のたたみかた

- ① 本体を折りたたむ際は、必ずリクライニングの角度を定位置 (97度) に戻し、座部マットを取り外してから行ってください。
- ② 本体を開閉するときは、背もたれと座部の中央を持って行ってください。

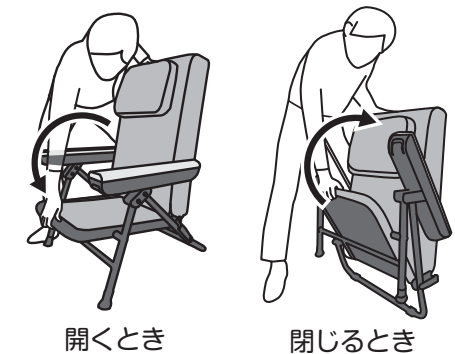

## 2 本体カバーが破れていないか確認する

ご使用前には必ず本体カバー、背パッド、ピローが破けていないか確認してください。布地が破れた状態で使用すると、重大な事故の原因となります。

## 3 ACアダプターと本体を接続し、コンセントに差し込む

- ① 本体のDCジャックにACアダプターのDCプラグを根元までしっかりと差し込みます。
- ② コンセントにACアダプターの電源プラグを根元までしっかりと差し込みます。


**警告** 身体にアクセサリや、マフラーなどをつけて使用しない

**警告** 本体可動部やすき間などに頭、手や足などを入れない

## 使いかた

### 1 ピローを外し、マッサージカバーをめくる。

※ もみ玉の刺激が強すぎる場合は、マッサージカバーやタオルなどをかぶせて感触を調節してください。

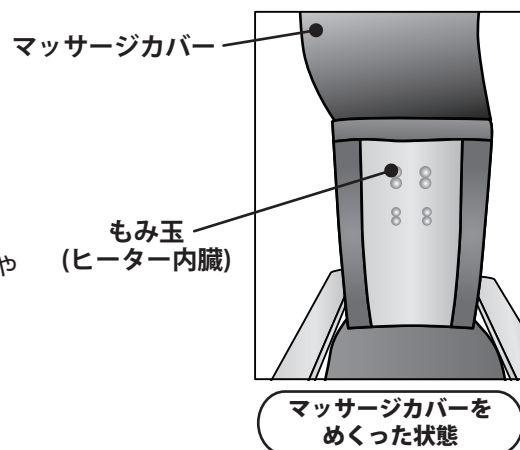

### 2 背もたれをお好みの角度に調整する。

- ① アームレストに両腕を置き、左右のフィンガーポケットに指を合わせます。
- ② カチッと音が鳴るまでアームレストを左右のアームレストを同時に上に上げてください。アームレストを上げた状態で背もたれに体重をかけるとリクライニングが倒れます。お好みの角度の状態でアームレストを下げれば背もたれが固定されます。リクライニングの角度は床面に対して、約 97° ~140° の間で 6 段階調整できます。



**注意**



アームレストを下げる際、必ずフィンガーポケットに手をかけて行う  
手を挟み、事故やけがの原因となります。  
影の部分を持つと指を挟む恐れがあります。



- ③ 両側のアームレストを上げた状態で、体重をかけずにいると背もたれが戻ります。

**注意**

リクライニングの角度を戻す時は背もたれに背をつけた状態で行う。  
背もたれ後ろに障害物や人、動物がないか確認してリクライニングする。  
事故やけがのおそれがあります。

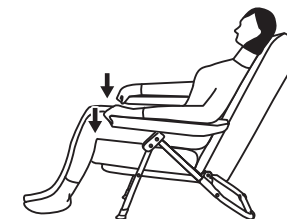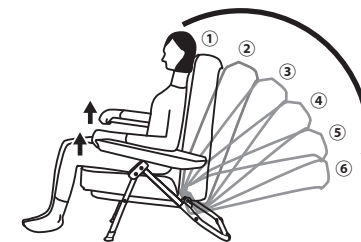

## 3 「マッサージコース」を選択する

### 自動マッサージコース (約 15 分)

- ① 「電源」ランプが点灯した状態で「自動コースボタン」を押すと「自動」ランプと、「全身」ランプが点灯し、「自動マッサージコース」が作動します。
- ② 「部位ボタン」を押すと、「肩」ランプが点灯し、もう一度「部位ボタン」を押すと「腰」ランプが点灯します。

部位ランプ点灯時のマッサージ位置	
全身	「肩」から「腰」にかけて全体をマッサージします。
肩	「肩」のみを念入りにマッサージします。
腰	「腰」のみを念入りにマッサージします。


### お好みマッサージモード (約 15 分) ※タイモード

- ① 「お好みモードボタン」を押すと「お好み」ランプ、「全身」ランプ、「タイ」ランプが点灯し、「お好みマッサージタイモード」が作動します。
- ② 「部位ボタン」を押すと「肩」ランプが点灯し、もう一度「部位ボタン」を押すと「腰」ランプが点灯します。
- ③ 「タイ」ランプが点灯中に「もみ位置ストップボタン」を押すと「もみ位置ストップ」ランプが点灯し、もみ玉が回転しながら上下の動きが停止します。
- ④ 「もみ位置ストップ」ランプが点灯している時に、「もみ玉調整ボタン」を押すともみ玉が上下に移動します。「▲」を押し続けるともみ玉が回転しながら上へ移動します。「▼」を押し続けるともみ玉が回転しながら下へ移動します。




### お好みマッサージモード (約 15 分)※日本モード

- ① 「お好みモードボタン」を押すと「お好み」ランプ、「全身ランプ」、「タイ」ランプが点灯します。「日本ボタン」を押すと、「お好みマッサージ日本モード」が作動します。
- ② 「部位ボタン」を押すと「肩」ランプが点灯し、もう一度「部位ボタン」を押すと「腰ランプ」が点灯します。
- ③ 「日本」ランプが点灯中に「もみ位置ストップボタン」を押すと「もみ位置ストップ」ランプが点灯し、もみ玉が回転したまま上下の動きが停止します。
- ④ 「もみ位置ストップ」ランプが点灯している時に、「もみ玉調整ボタン」を押すともみ玉が上下に移動します。「▲」を押し続けるともみ玉が回転しながら上へ移動します。「▼」を押し続けるともみ玉が回転しながら下へ移動します。

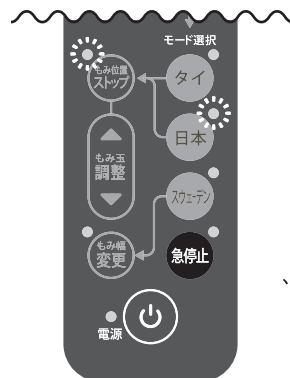

### お好みマッサージモード (約 15 分)※スウェーデンモード

- ① 「お好みモードボタン」を押すと「お好み」ランプ、「全身」ランプ、「タイ」ランプが点灯します。「スウェーデンモード」を押すと「お好みマッサージスウェーデンモード」が作動します。
- ② 「部位ボタン」を押すと「肩」ランプが点灯し、もう一度「部位ボタン」を押すと「腰ランプ」が点灯します。
- ③ 「スウェーデン」ランプが点灯中に「もみ幅変更ボタン」を押すと、もみ玉の角度が変わります。

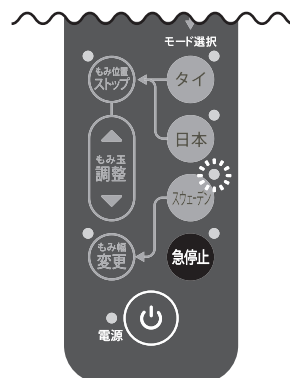

## 4 お好みに合わせてヒーターを選択する

電源ボタンが点灯した状態で「ヒーターボタン」を押してください。「ヒーター」ランプが点灯し、もみ玉が赤く光ります。

## 5 タイマーが働き、動作が自動的に終了します。ACアダプターをコンセントから抜く。

- 自動コースを途中でやめるには ■ 身体に異常を感じたり、非常事態がおこった場合は

操作パネルの「急停止」ボタンを押してください。その場で動作が停止します。電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- ご使用時間について


本製品の使用時間は1回 15 分とし、連続使用はしないでください。同じ部位への連続使用は、筋肉や神経に必要な以上の刺激が与えられ、事故やけが、体調不良をおこすおそれがあります。

- オートタイマーについて

使い過ぎや切り忘れ防止するため、動作開始から約 15 分で自動的に止まります。

## お手入れについて

- ① 本体やリモコン、ピローについた汚れは乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- ② 汚れのひどいときは、水または中性洗剤をしみこませた布をよく絞ってふきとり、柔らかい布でからぶきしてください。ただし、本体内部に水などが入らないようにご注意ください。
- ③ 自然乾燥させよく乾かしてください。

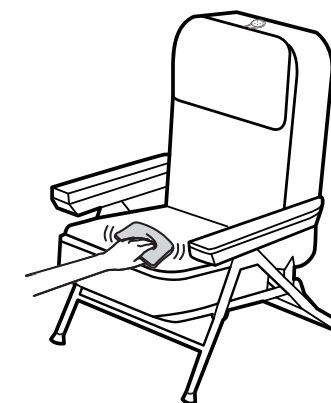

# 故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に、もう一度次の項目をお確かめください。それでも調子が悪いときはただちに使用を中止し、お買い上げ販売店、または当社にお問い合わせください。

こんなときは	考えられる原因	このように処置してください
動作中の音が気になる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●もみ玉が動作するときの「ウィーン」「カチツ」「ジー」音。</li> <li>●もみ玉が移動するときの「ウィーン」「カチツ」音。</li> </ul>	構造上発生するもので異常ではありません。
動作しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●コンセントからACアダプターの電源プラグがはずれている。</li> <li>●本体とACアダプターが正しく接続されていない。</li> </ul>	<p>電源プラグを奥までしっかりとコンセントに差し込んでください。</p> <p>本体のDCジャックにACアダプターのDCプラグを差し込んでください。</p>
使用中に止まった	<ul style="list-style-type: none"> <li>●タイマーがはたらき、動作が止まっている。</li> </ul>	30分以上時間をあけてから操作をしてください。
リモコンランプが同時に全て点滅する	<p><b>物が挟まった場合</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●もみ玉に無理な力がかかり安全装置がはたらき、動作が止まっている。</li> </ul>	電源プラグをコンセントから抜いてください。もみ玉に挟まっている物を本体から離してください。その後電源プラグをコンセントに差し込み「電源ボタン」を押すと、もみ玉が最上部へ移動します。
	<p><b>もみ玉に負荷がかかった場合</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●もみ玉に無理な力がかかり安全装置がはたらき、動作が止まっている。</li> </ul>	もみ玉に負荷がかかっていない状態（本体から降りるなど）で入 / 切ボタンを押してください。もみ玉が最上部へ移動します。
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●モーターの温度上昇により、安全装置が働き、もみ玉動作が止まっている。</li> </ul>	リモコンランプがすべて点滅した状態が変わらない時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。1時間ほど時間をあけてから再度、電源プラグをコンセントに差し込み、動作を確認してください。

## 点検後も異常がある

ただちに  
**使用中止**

**必ずコンセントを抜いて  
販売店に点検・修理を依頼してください。**

## 長年ご使用の「ポルト マッサージチェア」のご点検を!

しばらく使用していなかった機器を使用するときは、使用前に機器が正常に動作することを確認してください。



愛情点検

### こんな症状はありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い
- 電源コードに深い傷や変形がある
- 焦げ臭いにおいがする
- 動作中に異常な音や振動がする
- スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある
- その他異常や故障がある

以上のような症状のときは、故障や事故防止のため、ご使用中を中止し電源プラグをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

## 警告

**ぬれた手でACアダプターを抜き差ししない。**  
感電の原因になります。

**絶対に分解・改造・修理をしない。**  
感電の原因になります。また発火や異常動作をして、けがをするおそれがあります。

**直射日光の当たるところでは使用しない**  
変形・変色・変質のおそれがあります。

## 警告

**お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜く。**  
電源プラグがコンセントに差し込まれたままだと、火災や感電の原因になります。

**お手入れにはベンジン・シンナー・アルコール・アルカリ性洗剤・漂白剤などは使用しない。**  
変形や変色、変質など本体の外装を傷めるだけでなく、ひび割れによるけがのおそれがあります。

## 保管について

使用後は直射日光の当たらない湿気の少ない場所に保管してください。また、長期間使用しない場合は汚れを取ったあと、布などのカバーをかけ、ホコリがかからないようにご注意ください。

## 本製品の廃棄方法について

地球環境保護のため、破棄するときは、各自治体の取り決めにしたがってください。

# 主な仕様

販売名	ポルト マッサージチェア AIM-250
一般の名称	家庭用電気マッサージ器
医療機器認証番号	231AGBZX00023000
使用電源	専用ACアダプター (IVP1200-2500P)
電気定格	AC100V 50/60Hz 30W(電熱装置6.2W含む)
本体定格	DC12V 17.5W(電熱装置6.2W含む)
定格時間	15分
オートタイマー	15分
外形寸法 (幅×奥行×高さ)	(約)幅61cm×奥行70~108cm×高さ62~88cm 座面高さ34cm
質量	約15kg
電源コード長さ	約1.8m
材質	構造部材:スチールパイプ 張り材:ポリエステル、ナイロン クッション材:ウレタンフォーム
医療機器製造販売業	株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5



- (1) 保証書(裏表紙)  
保証書は所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管ください。
- (2) 保証期間中に修理を依頼される場合  
保証書の記載内容に従って修理いたします。
- (3) 保証期間を過ぎて修理を依頼される場合  
修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。
- (4) 補修用部品の最低保有期間  
当社はこのポルト マッサージチェア の補修用性能部品\*を製造打ち切り後最低5年間保有しております。(ただし、縫製部品は除きます)  
※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する為に必要な部品です。
- (5) ご使用中にふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。  
※お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対におやめください。

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、まずはお買い上げ販売店にお申し付けください。

## 【お客様相談窓口】

ナビダイヤル ■ 携帯OK ■ 全国どこからでも 市内通話料でOK

 **0570-081-634**

※お客さまが加入されている電話(NTT 以外の一般回線、PHS、及びIP 電話等)によっては、ご利用出来ない場合がございますので、下記電話番号へおかけください。

【受付時間】 祝日を除く 月～金 10:00～17:00 (都合によりお休みさせていただく場合がございます)

株式会社ツカモトコーポレーション エイム事業部

TEL:03-3279-1511・1512 FAX:03-3279-1515 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-6-5

## MEMO

MEMO area with horizontal dashed lines for writing.

MEMO

A large rectangular box with a solid black border and horizontal dashed lines for writing, occupying most of the page.A large rectangular box with a solid black border and horizontal dashed lines for writing, occupying most of the page.